

“思泰瑞” 低溫滅菌劑

“STERIS” VAPROX HC Sterilant

衛部醫器輸字第 034720 號

使用前請務必詳閱原廠之使用說明書並遵照指示使用。

■產品用途

本產品專供 V-PRO 低溫滅菌機而使用。


■產品敘述

V-PRO 低溫滅菌系統從 VAPROX HC 滅菌劑液體產生過氧化氫蒸氣擴散到整個鍋腔中，用於醫療機構內經適當處理後(清潔，沖洗和乾燥)器材之最終滅菌。

■使用方式

在安裝 VAPROX HC 滅菌劑之前，請檢查外盒和滅菌劑杯上的使用期限。請勿使用過期的滅菌劑杯。

1. 拉撕標籤打開外盒，取出裝袋的滅菌劑杯。

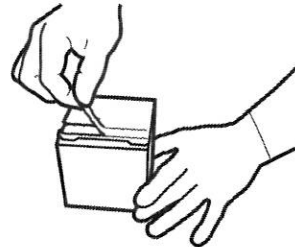

2. 打開外袋包裝拿出滅菌杯



3. 把滅菌劑杯投入滅菌鍋接收處



■警告以及注意事項

應穿戴個人防護裝備來處理滅菌劑盒，例如戴化學防護手套。

有關危害物質資料，請見 VAPROX HC 滅菌劑物質安全資料表(SDS)。

請參閱滅菌系統主機的操作手冊了解使用說明。

警告-如果滅菌劑外盒包裝已損壞，請勿使用。

如果袋子中有液體，請勿打開。

危險-請勿試圖打開或刺破滅菌劑杯。

危險:

- 屬氧化劑，可能加劇火勢。
- 吞食有害。
- 導致嚴重皮膚灼傷和眼睛損傷。
- 吸入有害。
- 可能會導致呼吸道刺激。

防範說明:

- 遠離熱源、熱表面、火花、明火和其他點火源。禁止抽煙。
- 避免吸入霧氣和/或蒸氣。
- 如果誤吞：漱口。不要催吐。
- 如果沾染皮膚（或頭髮）：立即脫掉所有被沾染的衣服。用水沖洗皮膚。
- 如果吸入：將人員轉移到新鮮空氣處並保持呼吸舒適。
- 如果進入眼睛：用水小心沖洗幾分鐘。如果有隱形眼鏡且容易取出時請先取出後持續沖洗。
- 著火時：用水消滅。

■產品型號及規格:

型號：PB011, PB012

PB011 用於最少 15 個滅菌循環。

PB012 用於最少 4 個滅菌循環。

杯包裝資訊：

PB011 – 標準包裝 (113 mL; 3.8 fl oz); 3 杯/箱

PB012 – 小包裝 (29.6 mL; 1.0 fl oz); 4 杯/箱

物理性能：

顏色：無色

pH 值：0.0 - 3.5

狀態：液體

有效成分：59% 過氧化氫

惰性成分：41% 水

架儲期：

未拆封（PB011） 12 個月

未拆封（PB012） 6 個月

上機使用 14 天

儲存：

直立放置

涼爽乾燥區域（59-86°F [15-30°C]，0-65%相對濕度）

遠離可燃物

遠離生物和/或化學指示劑

製造業者名稱：(O) STERIS Corporation

(P) STERIS Corporation


製造業者地址：(O) 5960 Heisley Rd, Mentor, OH 44060, USA

(P) 6100 Heisley Rd, Mentor, OH 44060, USA

醫療器材商名稱：醫信國際有限公司

醫療器材商地址：依所轄衛生局最新核定之醫療器材商地址內容刊載(市售品須刊載實際地址)


PB011

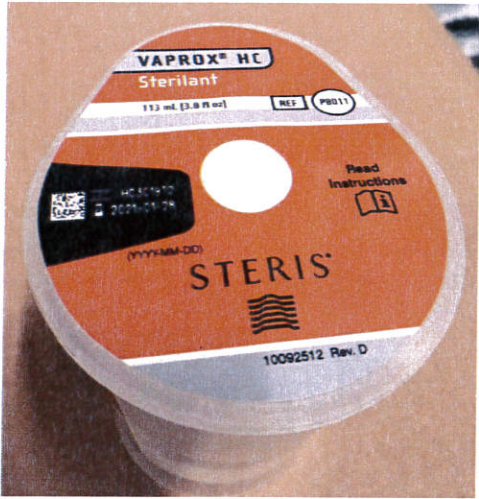



PB012




VAPROX HC Sterilant PB011 盒裝照片 上面

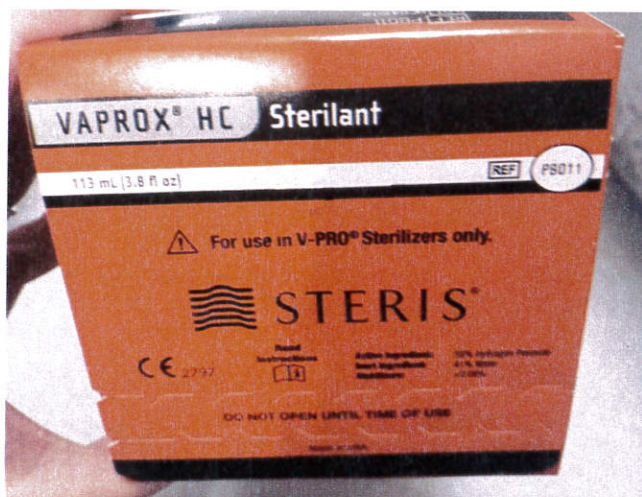

側面

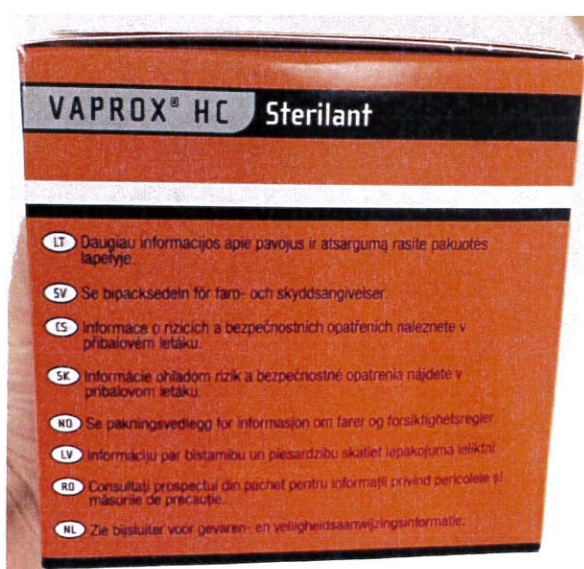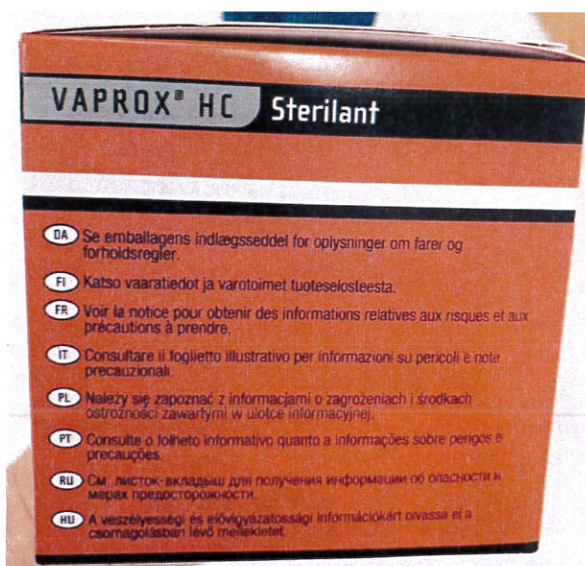

VAPROX HC Sterilant PB012 盒裝照片 上面

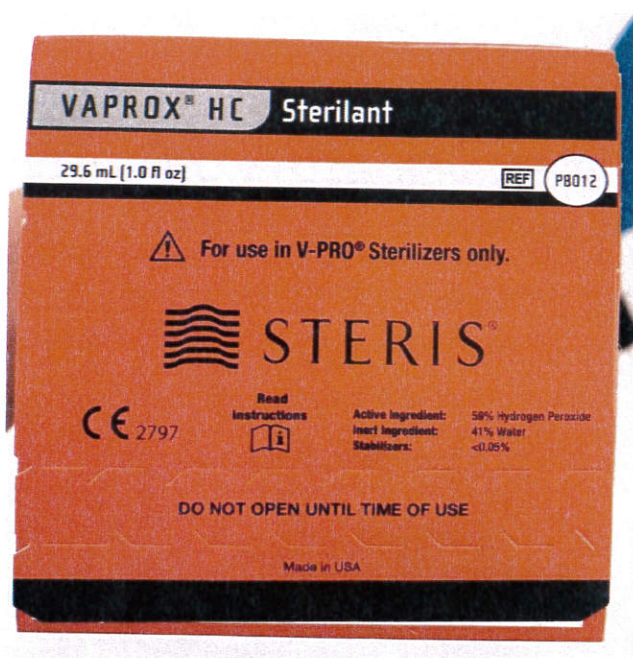

側面

