

“吉爾斯克”電外科電極器械防沾黏溶液
“Key Surgical” Electro Lube Electrosurgical Anti-Stick Solution

衛部醫器輸字第 036530 號

使用前請務必詳閱原廠之使用說明書並遵照指示使用。

■產品用途:

本產品為單一患者使用，用於電外科電極器械上以減少電極與組織相黏。

■禁忌症:

沒有已知的禁忌症和/或不良反應。

■注意事項:

- 包含：卵磷脂（大豆）。大豆是一種潛在的過敏原，對於已知對大豆過敏的病患，在治療計畫中應考慮到這一點。
- 本產品僅供一次性使用；重複使用可能會導致患者交叉污染。
- 請勿重新滅菌，產品重新滅菌可能會導致功能喪失。

■警告:

- 如果產品包裝損壞或打開，請勿使用，因為無法保證無菌。
- 將本產品與其他設備一起使用時，請遵守該設備隨附的所有說明和安全警告。

■操作說明:

1. 將小袋內容物放置到無菌區域。
2. 將泡沫墊背面紙背襯取下，並放置於在無菌手術布上。
3. 取下蓋子並將本產品塗抹在泡棉墊上或將電極頭浸入瓶中。
4. 用泡棉墊擦拭電極尖端以留下薄膜。
5. 根據需要重複以上步驟。

■棄置:

本產品應在使用後丟棄，請根據機構內標準執行棄置作業。

■產品型號與規格:

產品型號: EL-101

產品包含: • 4ml 瓶裝 Electro Lube

- 泡棉墊(不透射線)帶有黏性背襯
- 已滅菌立即可用
- 限單次使用
- 20 個/盒
- 有效期間: 3 年
- 包裝尺寸: 長 22.2 公分 x 寬 15.2 公分 x 高 10.6 公分
- 儲存環境: 原瓶存放於陰涼且乾燥的地方

製造業者名稱/地址:

Manufactured by Purple Surgical Manufacturing Limited (Address: Culmhead Business Centre, Culmhead, Taunton, Somerset, TA3 7DY, UNITED KINGDOM) for Key Surgical, LLC (Address: 8101 Wallace Road, Eden Prairie, MN 55344, USA)

醫療器材商名稱: 醫信國際有限公司

醫療器材商地址: 依所轄衛生局最新核定之醫療器材商地址內容刊載(市售品須刊載實際地址)

EL-101

